

GLYHAT GÖZ DAMLASI, 10 ml

KULLANIM KILAVUZU

Kuru, yorgun gözler için uzun süreli rahatlık

Kuru, tahriş olmuş veya rahatsız gözler için koruma ve rahatlama sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş, gelişmiş bir kayganlaştırıcı göz damlasıdır.

BİLEŞİMİ

Polietilen Glikol 400 (PEG 400)	%0.25
Sodyum Hiyalüronat	%0.20
Oksikloro kompleks koruyucu (Sodyum klorit)	
Borik asit	
Sodyum borat (dekahidrat)	
Sodyum klorür	
Potasyum klorür	
Kalsiyum klorür (dihidrat)	
Magnezyum klorür	
Enjeksiyonluk su	

ENDİKASYONLAR

Tahriş olmuş, rahatsız edici gözlerde rahatlama için destek olur, nemlendirir.
Kontakt lensler ile birlikte kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Herhangi bir kontrendikasyonu bilinmemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI

- Etkilenmiş göze gerektiğinde 1 veya 2 damla damlatınız.
- Gözün ıslatılması için gözünüzü birkaç kere kırınız.
- İhtiyaç duyduğunuz sıklıkta kullanınız.
- Kontakt lens kullanıyorsanız, kontakt lensler gözünüzdeyken kullanabilirsiniz.

UYARILAR

- Emniyet contası kırılmış veya kayıpsa kullanmayın.
- Solüsyonu yutmayınız.
- Bileşenlerinden herhangi birisine alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
- Kontaminasyonu engellemek için tüpün ucunu herhangi bir yüzeye ve gözünüze değdirmeyiniz.
- Son kullanma tarihinden sonra solüsyonu kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- 5°C - 25°C'de saklayınız.
- Açıldıktan 45 gün sonra tüpü ve kalan solüsyonu atınız.
- Genel olarak göz damlalarıyla ilgili potansiyel riskler, yan etkiler veya komplikasyonlar alerjik reaksiyonlar, inflamasyon veya infeksiyon olarak ortaya çıkmaktadır.

Devam eden sorunlarınızda lütfen göz doktorunuza başvurunuz.

YAN ETKİLER

Bildirilmemiştir.

SON KULLANMA TARİHİNDEN SONRA KULLANILMAMALIDIR.



WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No.50 Güneşli Bağcılar/İstanbul



2195

Sembollerin açıklaması:

Sembol	Açıklaması
	İmalatçı
	İmalat tarihi
	Son Kullanım Tarihi
	Parti kodu
	Aseptik işleme teknikleri kullanılarak steril edilmiştir.
	Ambalajı hasar görmüşse kullanmayınız.
	Sıcaklık limitleri
	Ürün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'nin gerekçelerini karşılar.
	Onaylanmış kuruluş numarası
	Kullanım kılavuzuna bakınız.